

## Contrôle et nettoyage d'un lot de formation secourisme



### MANNEQUINS

- Vérifier le contenu et noter ce qu'il manque :**
  - Contrôler les mannequins : s'assurer qu'aucune pièce n'est cassée ou déboîtée
  - Vérifier que tous les masques « bébé » ont bien leur embout
- Laver tous les masques à l'eau et au savon**, rincer et sécher correctement. Reconditionner dans un contenant propre ;
- Laver les torsos des mannequins à l'eau et au savon**, rincer et sécher correctement ;
- Changer les poumons** (cela permet de vérifier le bon fonctionnement)
- Laver les habits** : assurer un nettoyage en machine des effets adaptés au mannequin ;
- Le tapis d'entraînement** : le brosser à l'eau et au savon, rincer et sécher correctement.

### DEFIBRILATEUR DE FORMATION

Pour effectuer la maintenance du défibrillateur, il est important de respecter les points suivants :

- Contrôler visuellement le DAE et vérifier la présence des consommables.** Les électrodes doivent être repositionnées sur leur support. S'assurer que la colle est toujours efficace ;
- Contrôler tous les voyants de l'appareil et s'assurer que ceux-ci sont tous au vert.** Tous les appareils possèdent un voyant pour leur état général, pour signaler la puissance de la batterie restante ou la nécessité d'une maintenance ;
- Vérifier que le défibrillateur fonctionne.** Les fabricants mettent à disposition un mode d'emploi avec une liste de recommandations à suivre pour effectuer ces contrôles en toute sécurité ;
- Remplacer la pile ou les piles de sauvegarde si nécessaire.** Les appareils de formation fonctionnent avec des piles ainsi que les télécommandes de scénarios. Remplacer les piles selon l'état de charge si nécessaire ;
- Mise à jour du logiciel du défibrillateur.** Les défibrillateurs modernes embarquent des technologies innovantes permettant au fabricant de faire évoluer l'appareil au cours de sa durée de vie, tant au niveau technique que des recommandations pédagogiques ;
- Mettre en place un registre de maintenance ou une traçabilité.** Le registre est propre à chaque appareil.

### LA MALETTE DE MAQUILLAGE

- La vider, la laver à l'eau et au savon, la rincer et sécher correctement ;
- Remettre les ustensiles un par un en les nettoyant ;
- La compléter si nécessaire.

## ACCESSOIRES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

1. **Tapis de sol** : laver à l'eau et au savon, la rincer et sécher correctement ;
2. **Coupe de tête** : laver à l'eau et au savon, la rincer et sécher correctement ;
3. **Matériel de simulation, mise en situation** : laver à l'eau et au savon, la rincer et sécher correctement ;
4. **Les pictogrammes** :
  - Vérifier le contenu
  - Remplacer les manques
5. **Matériels bureautique** : s'assurer du fonctionnement et remplacement.